

lexie

Camino auditivo

Comenzar

¿Necesita ayuda? Llame al (779) 212 7334

Esta Guía de inicio rápido le ayuda a configurar sus audífonos de venta libre. **Antes de usar, retire las tiras adhesivas que cubren los contactos de carga de cada audífono. Luego, encienda el Bluetooth® de su teléfono inteligente.**

Descargue la aplicación Lexie GRATIS.

Escanee el código QR o búsquelo en App Store o Google Play.



PASO 1 Conozca sus audífonos



PASO 2 Emparejamiento con su teléfono

1. Coloque ambos audífonos en el estuche de carga con la tapa abierta.
2. Mantenga presionado el botón de emparejamiento hasta que la luz de estado parpadee en azul.
3. En la aplicación Lexie, seleccione **Audífonos Lexie H1**.



Botón de emparejamiento


PASO 3 Posición de su audífono

Inserte los audífonos con la cúpula primero, el cuerpo mirando hacia atrás y los contactos de carga hacia usted. Tenga cuidado de no insertar el cuerpo del audífono en el propio conducto auditivo.

Presione suavemente el audífono hacia adentro, girándolo con el Control táctil hacia afuera, no hacia arriba.

PASO 4 Selección de cúpulas

Pruebe diferentes tamaños de cúpulas para encontrar las que le resulten más cómodas, asegurándose de que esté bien sujetas.

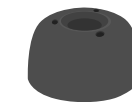


Cúpulas con ventilación

PASO 5 Seleccione un Programa predefinido

Utilice la aplicación Lexie o pulse dos veces el Control táctil para elegir el mejor Programa para usted.

Un toque en el Control táctil alterna entre los modos de transmisión y audición.

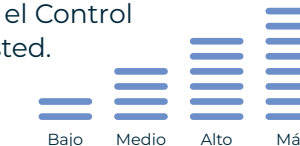

PASO 6 Personalice su sonido y sus ajustes

En la aplicación Lexie, personalice sus dispositivos y ajuste el **volumen y los ecualizadores**, seleccione **valores predefinidos**, maneje el **ruido** no deseado y controle los **micrófonos** y las **funciones del Control táctil**.

La aplicación Lexie muestra la duración de la batería en tiempo real de sus audífonos y su cargador.

Camino auditivo

Qué esperar

SEMANA 1

La paciencia es fundamental

El cerebro y los oídos tardan entre 3 y 4 semanas en adaptarse a los audífonos de venta libre.



Comience con un programa predefinido más silencioso durante **1 o 2 horas al día** en lugares tranquilos y luego aumente gradualmente el volumen o cambie a un valor predefinido más alto a medida que se acostumbre más. Con el tiempo, extienda el tiempo de uso y vaya a entornos más ruidosos.

La picazón en los conductos auditivos o el sonido diferente de su propia voz son normales y probablemente se desvanezcan con el tiempo.

SEMANAS 2 A 3

Practique



Use sus audífonos durante **3 a 4 horas al día** en diversas situaciones de escucha tranquilas y ruidosas, en interiores y al aire libre.

Pruebe diferentes programas según sus preferencias auditivas.

SEMANAS 3 A 4

Aduéñese de su proceso



Comience a aumentar su tiempo de uso de **4 a 8 horas por día**.

Recuerde descansar regularmente mientras se acostumbra a sus audífonos, especialmente si se siente abrumado.

SEMANA 5 Y DESPUÉS

Siga de la misma manera



Continúe usando sus audífonos **durante más de 8 horas todos los días** para reforzar el aprendizaje de su cerebro.

Limpie regularmente las cúpulas, los receptores, las entradas del micrófono y los contactos de carga para garantizar un desempeño constante y evitar problemas.

Consulte “*Rutina de limpieza*” en la sección 7 de la parte 2 del Manual del usuario para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda?

Llame al **(779) 212 7334**

Correo electrónico **support@lexiehearing.com**

Este documento es solo una breve descripción general para comenzar. Consulte los Manuales del usuario para obtener detalles y advertencias importantes. También puede comunicarse con nosotros por teléfono o correo electrónico para solicitar ayuda.

Los Audífonos Lexie H1 están diseñados para usarse como un par para un desempeño óptimo de los audífonos y la transmisión.

Duración de la batería: hasta 9 horas sin transmisión, 6 horas con transmisión. Recárguela a diario para un tiempo de funcionamiento máximo.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2025 LXE Hearing, Inc.

REV1

lexie®